



## Stor och lätt att förstå

### GEWA Maxi - IR fjärrkontroll

GEWA Maxi är en stor, robust och lättanvänd IR fjärrkontroll, (IR=infrarött ljus) som hjälper individen att hantera utrustning i sitt boende. Individen kan styra tv, musikanläggning och lampor samt öppna och stänga fönster och dörrar.

Vid nedsatt rörelseförmåga, syn eller svårigheter att förstå en vanlig fjärrkontroll, vägleder GEWA Maxi med bilder och stora knappar.

Med GEWA Maxi kan individen bli mer självständig och behöver inte ta hjälp av anhöriga eller andra stödpersoner.

Art.nr 461130



ABILIA

## GEWA MAXI GÖR DET SVÅRA ENKLARE

Traditionella fjärrkontroller har ofta många och små knappar. Dessa kan vara svåra att se, förstå och att trycka på. Ibland krävs mer än en fjärrkontroll för att se på tv, till exempel om man har en box kopplad till tv:n.

Med GEWA Maxi får användaren ett avgränsat antal stora knappar som bara visar det som är aktuellt att styra. En knapptryckning kan dessutom generera en serie av händelser, till exempel först starta boxen och sedan tv:n.



## LÄTT ATT STYRA

GEWA Maxi har 16 stora knappar som endast kräver liten tryckkraft.

Knapparna är nedsänkta för att underlätta att träffa rätt vid nedsatt känsel och motorik.

Bekräftelse i form av ljud, ljus och vibration ger återkoppling på ett knapptryck.

För individer med skakningar i handen, till exempel p.g.a. tremor, finns möjlighet till anslagsfördröjning. Det innebär att en knapp behöver hållas intryckt en förvald tid innan valet aktiveras.

## LÄTT ATT FÖRSTÅ

Knapparna anpassas med stödjande bilder som tydligt symboliserar det som ska styras.

Överlägg med bilder skapas enkelt via Abilias hemsida. En plastficka skyddar överlägget mot smuts och vätska.

Om inte alla 16 knappar behöver användas, kan man dölja oanvända knappar med täcklock. Locket gör att ytan känns slät och knappen inte syns.

## LÄTT ATT HANTERA

Det går snabbt att komma igång och använda GEWA Maxi. Första steget är att kontrollera att TV och annan utrustning stödjer IR-tekniken. TV:ns och digitalboxens originalfjärrkontroller behöver sända ut infrarött ljus. En inspelningsguide vägleder hur du överför IR-kanaler från utrustningens originalfjärrkontroll.

Med hjälp av medföljande kardborreband kan GEWA Maxi fästas på ett bord. Detta hindrar den från att glida iväg eller tappas bort. Till skillnad mot en traditionell fjärrkontroll behöver du inte rikta GEWA Maxi mot utrustningen du vill styra.



### TEKNISK INFORMATION GEWA MAXI

Längd	242 mm
Bredd	160 mm
Höjd fram	23 mm
Höjd bak	42 mm
Vikt	700 g

### TILLBEHÖR

Produkt	Artikelnr.
Plastficka GEWA Maxi	461172
Kardborreband GEWA Maxi	461173
Täcklock GEWA Maxi	461175

### LEVERERAS MED

Plastficka
Kardborreband
Täcklock
Batterier
Bruksanvisning

