



Styrer både din fysiske og virtuelle verden

GEWA Connect

GEWA Connect hjelper deg med å styre dine fysiske omgivelser, som TV, lamper, vinduer og dører.

Den hjelper deg også med å holde kontakten med familie og venner, ettersom du også kan bruke GEWA Connect til å ringe, sende SMS og bruke Facebook og andre sosiale medier. Du kan lese de siste nyhetene på nettet, se på YouTube eller spille musikk ved å styre smarttelefonen din med GEWA Connect.

Art.nr 461190



ABILIA

STYRER DIN FYSISKE OG VIRTUELLE VERDEN


GEWA Connect forener din fysiske og virtuelle verden og gjør det enkelt å styre begge. Installer GEWA Connect på din egen enhet, så kan du umiddelbart begynne å kontrollere omgivelsene dine fra smarttelefonen eller nettbrettet.

HVORDAN FUNGERER GEWA CONNECT?

Hjertet i systemet er Abilia Multibox, som kobles til enheten din via kabel. GEWA Connect er installert på enheten og mottar kommandoer fra styrekontakten som er tilkoblet multiboksen. Fjernkommandoer sendes fra appen til IR- eller GEWA-radiosenderen i multiboksen for å styre dine fysiske omgivelser.



Listevissning

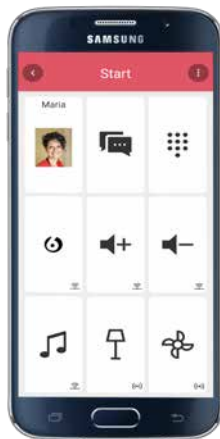

Rutenettvissning

Du kan velge å håndtere miljøet med enten listevissning eller rutenettvissning, avhengig av behovene dine.

Systemet styres med mekaniske kontakter, sug- og blåsekontakter eller den typen kontakt som passer best til dine behov.

Du kan enkelt veksle mellom listeskanning og punkt-skanning, avhengig av hvilken app og hvilken funksjon du bruker i øyeblikket.



GEWA Connect punktskanning på et nettbrett

INTEGRERT ALARMFUNKSJON GIR TRYGGHET

I GEWA Connect finnes det en integrert alarmfunksjon, slik at du raskt skal kunne påkalle hjelp ved behov. Alarmen sendes på den måten du selv har valgt. Funksjonen utføres i multiboksen, noe som betyr at alarmen kan sendes selv om telefonen din er avslått.

TA MED DEG GEWA CONNECT NÅR DU REISER

Du kan ta med deg GEWA Connect når du er på reisefot. Det er mulig å definere kommandoen for de omgivelsene du vanligvis beveger deg i utenfor hjemmet.

ENKEL OG SIKKER DATAHÅNDTERING

Takket være nettjenesten myAbilia kan du håndtere innstillinger og konfigurasjon via en datamaskin, og alt lagres på et sikkert sted på Internett. Hvis du skulle miste telefonen av en eller annen grunn, er det derfor lett å laste ned informasjonen fra myAbilia til den nye smarttelefonen eller det nye nettbrettet.

LEVERES MED

- Multibox inkl kabler og lader
- Håndbok
- Lisensbevis
- Anbefalinger

TEKNISK INFORMASJON GEWA CONNECT 461190

KRAV TIL BRUKERENS MOBILE ENHET	MULTIBOX	TILBEHØR	ART NR
OS	Android 9 eller høyere	Telefonholder (telefon + multibox)	461198
Tilkoblinger	USB-C	Nettbrettholder (nettbrett + multibox)	461196
	Mål i mm (HxBxD)	Miniarm	451030
	Vekt	Universalarm	621966
	Tilkoblinger		
	Transmit metod		

GEWA Connect er medisinsk utstyr utviklet til bruk innendørs.