

IntelliGaze Ögonstyrning för Rolltalk och PC



*En viljemässig rörelse
är tillräckligt!*





OM INTELLIGAZE

IntelliGaze är en ögonstyrning och ett program som gör det möjligt att följa en brukares ögonrörelser. Brukaren kan därmed använda alla funktioner i sin Rolltalk eller PC. Systemet ersätter både mus och tangentbord. Alternativ på skärmen kan antingen väljas automatiskt efter en viss tid, aktiveras med en kontakt eller genom att blinka.

IntelliGaze ögonstyrning är integrerad i Programsnickaren vilket gör att allt som brukaren behöver för den dagliga användningen kan styras direkt från brukarprogrammet. I tillägg går det att nyttja kompletterande styrsätt och direktval för sådana funktioner personen behöver omedelbar åtkomst till. Ögonstyrningen fungerar också bra för de flesta med glasögon och linser.

MOBILITET

IntelliGaze med Rolltalk är liten och mobil, och lämpar sig väl för montering på rullstol. Lätt att flytta mellan t.ex. rullstol och arbetsbord eller säng.

FLEXIBILITET

Rolltalk kan användas med olika styrsätt. Kompletterande styrsätt kan kombineras med ögonstyrning, för att matcha användarens dagsform och behov.

MÅLGRUPP

IntelliGaze ögonstyrning passar personer med minimala eller små rörelser likväl för personer som har ofrivilliga rörelser. Med IntelliGaze kan användaren kontrollera

alla funktioner i Rolltalk eller på PCn genom att titta på skärmen. Det kan vara att kommunicera, SMS:a, sända e-post, surfa, styra TV, dörröppnare, lyssna på böcker eller musik och mycket mer.

ANVÄNDBARA VERKTYG FÖR HJÄLP VID UTPROVNINGSTILLFÄLLET

- Gaze Assistant – Testar brukarens förmåga att fixera blicken, synfältet och blinktid. Kan genomföras utan kalibrering. Resultaten kan lagras i en rapport. Detta kan användas som information, och ger möjlighet att med tiden som går se eventuella förändringar.
- Videoinspelning - funktion för att spela in brukarens ögonrörelser på skärmen, samt ljudupptagning.
- Eye Gestures – Möjlighet att använda ögonrörelser för att utföra specifika åtgärder. Som exempelvis tangentbordåtgärder som ofta används (exempelvis i spel) för att öppna vissa program etc. Kräver ingen kalibrering.

NYA MÖJLIGHETER

- Kräver ingen extra ström
- Slimmad och mobil
- 30% större arbetsvolym
- En USB-anslutning för data och ström
- Förbättrad noggrannhet
- Full bakåtkompatibilitet

TEKNISK DATA

- Maximalhastighet huvudrörelse: 15 cm/s
- Återhämtnings tid efter för snabba huvudrörelser: 40 ms
- Storlek: 285 x 44 x 38 mm [BxHxD]
- Vikt: 280g

För mer teknisk info besök vår hemsida

INTELLIGAZE 3

> ARTIKKELNUMMER: 460888 IntelliGaze 3 Ögonstyrning för Rolltalk

> ARTIKKELNUMMER: 460887 IntelliGaze 3 Ögonstyrning för PC

> BESÖK VÅR HEMSIDA: www.abilia.se för mer information, bilder och filmer